



DK

Anvendelsesformål:

Gåsål til anvendelse til gipsbandager og syntetiske støbte bandager.

Indikationer:

Gåhjælp til støtbandager/gåbandager
Beskyttelse af bandagen mod urenheder og fugt nedefra

Kontraindikationer:

Ikke kendt i øjeblikket.

Anvendelsesvejledning:

Åbn remmens burrelukkning. Træk ikke remmen ud gennem lænkerne i hældelen. Stil foden på gåsålen, og anbring den diagonale del af remmen over foden. Sørg for, at hælen er placeret helt tilbage, og at foden sidder sikkert på gåsålen. Træk den del af remmen, som går over foden, til, og før enden af remmen diagonalt over foden (1). Før remmen gennem plastlænken, og luk remmen ved hjælp af burrelukkningen (2+3).

Anvendelses note / Forsigtighed:

- Det er ikke tilladt at føre bil, når man har produktet på.
- Ved slitage eller beskadigelse af gåsålen må produktet ikke længere anvendes.
- Hav ikke produktet på direkte på huden.
- Gå langsommere end normalt, og vær først og fremmest forsigtig, når du går på ujævne veje eller går op ad trapper.
- Brug ikke produktet på åbne sår. I de følgende tilfælde skal du konsultere din læge inden brug: hudlidelser, lymfedrenationsforstyrrelser, sensationsforstyrrelser, kredsløbssygdomme, hævelser i blødt væv som ikke kan forklares.
- Dette produkt er kun beregnet til en enkelt patient.
- Om nødvendigt kan hjælp fra en anden person være gavnlige for korrekt anvendelse af produktet.
- En optimal effekt kan kun opnås ved at vælge den rigtige størrelse og variant samt den korrekte anvendelse.
- Produktet bør ikke længere bruges, hvis det er beskadiget eller meget slidt, eller hvis eksisterende samlinger og låse ikke længere fungerer korrekt.
- Sørg for, at ingen stofdele beskadiges af eksisterende velcro-fastgørelseselementer.
- Anvend ikke produktet for stramt, da det kan skade blodcirkulationen.
- Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte din læge.
- Informer producenten og den kompetente myndighed i dit land om alvorlige hændelser med dette produkt.
- Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om produktet og dets håndtering, skal du kontakte din læge eller fagpersonale.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Samtidig brug med andre produkter kun efter konsultation med din læge.

Plejeinstruktioner:

Produktet kan rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel eller med en blød børste. Luk alle velcrolukkninger inden rengøring for at undgå at beskadige andre tekstiler. Lad det lufttørre. Undgå direkte varmekilder og må ikke maskintørres ikke eller stryges. Sørg for, at produktet er helt tørt, inden du bruger det igen. Må ikke renses og brug ikke blegemiddel, opløsningsmidler, eller skyllemidler. Fedtholdige eller sure stoffer, salver eller lotioner kan beskadige materialet.

Materialesammensætning:

Polyurethan (PUR), Polyamid (PA)

Råd om opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted og beskyt det mod varme, direkte sollys og fugt.

Bortskaffelsesnotat:

Bortskaffelse i husholdningsaffald er muligt.

SE

Avsedd användning:

Gipssula för användning när foten är i gips eller ett syntetiskt gjutförband.

Indikationer:

Gånghjälpmedel vid stödförband/gångförband
Skydd av förband mot föroreningar och väta underifrån

Kontraindikationer:

För närvarande okänt.

Användningsinstruktion:

Öppna kardborrbandet på bandet. Dra inte bandet genom spännena i häldelen. Sätt foten på gipssulan och lägg den diagonala delen av bandet över foten. Se till att hälen sitter så långt bak det går och att foten är korrekt placerad på gipssulan. Dra åt bandet över foten stramt och dra bandänden diagonalt över foten (1). Lirka in bandet genom plastspännet och stäng bandet med hjälp av kardborrbandet (2+3).

Appliceringsnotering / Varning:

- Du får inte köra bil när du bär produkten.
- Vid slitage eller skador på skosulan ska produkten inte längre användas.
- Bär inte produkten direkt på huden.
- Gå långsammare än normalt och var framförallt försiktig när du går på ojämn väg och i trappor.
- Använd inte produkten på öppna sår. I följande fall bör du kontakta din läkare innan användning: Hudsjukdomar, lymfatiske dräneringsstörningar, sensoriska störningar, cirkulatoriska störningar, oklar mjukdelssvullnad.
- Denna produkt är avsedd för användning på en enda patient.
- Om det behövs kan hjälp av en annan person vara fördelaktigt för en korrekt applicering av produkten.
- Endast genom att välja rätt storlek och variant, liksom en korrekt applicering, kan en optimal funktion uppnås.
- Produkten ska inte längre användas om den är skadad eller kraftigt sliten, eller om befintliga leder och fästen inte längre fungerar korrekt.
- Se till att inga tygdelar skadas av befintliga kardborreband.
- Sätt inte på produkten för hårt, eftersom detta kan påverka blodcirkulationen.
- Om symptomen kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare.
- Informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i landet om allvariga incidenter med denna produkt.
- Om du är osäker eller har frågor om produkten och dess hantering, kontakta din läkare eller kvalificerad personal.
- Gör inga justeringar på produkten.
- Samtidig användning med andra produkter endast efter samråd med din läkare.

Skötselanvisningar:

Produkten kan rengöras med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel eller med en mjuk borste. Stäng alla kardborreband för rengöring för att undvika att andra textiler skadas. Låt lufttorka. Undvik direkta varmekällor och torka inte eller stryk. Se till att produkten är helt torr innan du använder den igen. Rengör inte och använd inte blekmedel, lösningsmedel eller sköljmedel. Fettsyror, salvor eller lotioner kan skada materialet.

Materialsammansättning:

Polyuretan (PUR), Polyamid (PA)

Förvaringsanvisningar:

Förvara produkten på en torr plats och skydda den från värme, direkt solljus och fukt.

Avfallshantering:

Avyttring via hushållsaffallet är möjlig.



Schaper
HEALTHCARE

DE EN FR NL DK SE

**Gehsohle
Walking Sole
Semelle pour plâtre de marche
Loopzool
Gåsål
Gipssula**

Model: SC9101



Schaper Healthcare GmbH

Vogelweiderstraße 146 | 4600 Wels | Austria

office@schaper-healthcare.com

www.schaper-healthcare.com



| Size | XS | S | M | L | XL |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Shoe size | 32-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
| Side | Universal | | | | |

