



Schaper
HEALTHCARE

DE EN FR NL DK SE

GNO Knieschiene
GNO Knee brace
Genouillère GNO
GNO Kniebrace
GNO Knæskinne
GNO Knästöd

Model: SCITW



Size	XXS	XS	S/M	L/XL	XXL
Thigh circumference (cm)	20-30	30-40	40-55	55-70	70-85
Splint length (cm)	39	43	50		
Side	Universal				

SE

Avsedd användning:

Knäledsortos för stabilisering, styrning och senare mobilisering av knäleden med möjlighet att begränsa rörelsens räckvidd (flexion och extension).

Indikationer:

För behandling av knäet efter ledbandsruptur och skador på sidoledband och/eller korsband
Posttraumatisk behandling
Postoperativ behandling
För posttraumatisk/postoperativ mobilisering av knäleden i definierade rörelseomfång

Kontraindikationer:

För närvarande okänt.

Ställa in gräns för extension/flexion:

Du kan justera det önskade rörelseområdet av skenans leder. För att göra detta, öppna ledlocket (1). Ta bort gränsstiften och sätt in dem i lämplig gradinställning (2). Se till att båda gränsstiften är placerade i samma gradinställning för att justera extension/flexion. Stäng ledlocket fullständigt igen.

Flexionsgräns: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

Extensionsgräns: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

Användningsinstruktion:

Sätt dig på en stol om möjligt och vinkla benet lite grann för att enklare ta på skenan. Öppna alla kardborrfästen och remmar, även de på skenvadderingen. Den dubbla runda knäplattan måste placeras på utsidan och den tunna knäplattan på insidan av knäleden. Ta vid behov bort plattorna och sätt tillbaka dem på rätt sida med hjälp av kardborrbanden. Placera knä-fästet runt benet (3). Placera lederna av skenan på sidan av knäet så att mitten av leden är högst upp på knäskålen. Stäng vadderingen på smalbenet med kardborrfästet, börja med den övre delen (4). Stäng skenans remmar med hjälp av kardborrfästena. Börja med övre smalbensremmen. Stäng sedan nedre benremmen, sedan nedre lårbältet och slutligen övre lårbältet (5+6).

Appliceringsnotering / Varning:

- När du använder knästödet måste gränsstiften alltid placeras i leden och får aldrig tas bort helt.
- För att förhindra att knäleden sprids isär måste alltid ett gränsstift placeras i gradinställningen 0° extension, såvida inte din läkare anger en annan inställning.
- Vi rekommenderar generellt att knäortosen inte används direkt på huden.
- Vid problem med huden (hudsjukdomar, vensjukdomar, överkänslighet mot tryck etc.) får knäortosen inte användas direkt på huden. Använd t.ex. en kompressionsstrumpa under knäortosen. Fråga din läkare i sådana fall.
- Använd inte produkten på öppna sår. I följande fall bör du kontakta din läkare innan användning: Hudsjukdomar, lymfatiska dräneringsstörningar, sensoriska störningar, cirkulatoriska störningar, oklar mjukdelssvullnad.
- Denna produkt är avsedd för användning på en enda patient.
- Om det behövs kan hjälp av en annan person vara fördelaktigt för en korrekt applicering av produkten.
- Endast genom att välja rätt storlek och variant, liksom en korrekt applicering, kan en optimal funktion uppnås.
- Produkten ska inte längre användas om den är skadad eller kraftigt sliten, eller om befintliga leder och fästen inte längre fungerar korrekt.
- Se till att inga tygdelar skadas av befintliga kardborreband.
- Sätt inte på produkten för hårt, eftersom detta kan påverka blodcirkulationen.
- Om symptomen kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare.
- Informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i landet om allvarliga incidenter med denna produkt.
- Om du är osäker eller har frågor om produkten och dess hantering, kontakta din läkare eller kvalificerad personal.
- Gör inga justeringar på produkten.
- Samtidig användning med andra produkter endast efter samråd med din läkare.

Skötselavvisningar:

Produkten kan rengöras för hand med ett mildt tvättmedel. Plast- och metalldelar på produkten (om befintliga) får inte tvättas och måste avlägsnas om möjligt. Dessa delar kan rengöras med en fuktig trasa. Stäng befintliga kardborreband före tvätt för att undvika skador på andra plagg. Låt lufttorka. Undvik direkta värmekällor, torka inte i maskin eller stryk. Använd inte kemiska rengöringsmedel, blekmedel, lösningsmedel eller sköljmedel. Feta eller sura ämnen, salvor eller krämer kan skada materialet.

Materialammansättning:

PUR-skum, Polyamid (PA), Bambukolgarn, Neopren (CR), PVC-Läder, Järn, Aluminium, Polypropylen (PP)

Förvaringsanvisningar:

Förvara produkten på en torr plats och skydda den från värme, direkt solljus och fukt.

Avfallshantering:

Avyttring via hushållsavfallet är möjlig.

DK

Anvendelsesformål:

Knæledsortose til stabilisering, styring og senere mobilisering af knæledet med mulighed for at begrænse leddets bevægelsesområde (strækning og bøjning).

Indikation:

Til stabilisering af knæet efter brist eller skader på sideledbånd og/eller korsbånd
Posttraumatisk behandling
Postoperativ behandling
Til posttraumatisk/postoperativ mobilisering af knæledet med fastlagt bevægelighed

Kontraindikationer:

Ikke kendt i øjeblikket.

Indstilling af stræknings-/bøjningsgrænse:

Du kan justere det ønskede bevægelsesområde på skinnens samlinger. For at gøre dette skal du åbne samlingslåget (1). Fjerne afgrænsningsspindene, og indsætte dem i den passende gradindstilling (2). Sørg for, at begge afgrænsningspinde er placeret i samme gradindstilling for at justere strækning/bøjningen. Luk låget helt igen.

Bøjningsgrænse: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

Strækningsgrænse: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

Anvendelsesvejledning:

Hvis muligt, sæt dig i en stol, og vinkl benet for at gøre det lettere at tage støtten på. Åbn alle velcrolukninger og stropper og velcrolukninger i skinnepolstringen. Den dobbelte runde knæpude skal placeres på den ydre side og den tynde knæpude på indersiden af knæledet. Fjern om nødvendigt puderne og fastgør dem igen på højre side ved hjælp af velcrolukningen. Anbring knæskinnen omkring benet (3). Placer samlingerne på skinnen på siden af knæet, så midten af samlingen er øverst på knæskallen. Luk polstringen på underbenet ved hjælp af velcrolukningen, startende med den øverste del. Luk derefter lårpolstringen ved hjælp af velcrolukningen, startende med den nederste del (4). Luk skinnens stropper ved hjælp af velcrolukningerne. Start med den øverste strop på underbenet. Luk derefter stroppen på underbenet, derefter nedre lårstrop og endelig stroppen på overlåret (5+6).

Anvendelses note / Forsigtighed:

- Når du bruger knæskinnen, skal afgrænsningsspindene altid placeres i samlingen og må aldrig fjernes helt.
- For at forhindre at knæsamlingen spreder sig, skal der altid placeres en afgrænsningspind i gradinstillingen 0° strækning, medmindre din læge angiver en anden indstilling.
- Det anbefales generelt ikke at bære knæbøjlen direkte på huden.
- I tilfælde af hudproblemer (hudsygdomme, vensygdomme, overfølsomhed over for tryk osv.) må knæbøjlen ikke bæres direkte på huden. For eksempel kan knæstøtten bæres over en støttestroppe. I dette tilfælde skal du tale med din behandlende læge.
- Brug ikke produktet på åbne sår. I de følgende tilfælde skal du konsultere din læge inden brug: hudlidelser, lymfedrenationsforstyrrelser, sensationsforstyrrelser, kredsløbssygdomme, hævelser i blødt væv som ikke kan forklare.
- Dette produkt er kun beregnet til en enkelt patient.
- Om nødvendigt kan hjælp fra en anden person være gavnlig for korrekt anvendelse af produktet.
- En optimal effekt kan kun opnås ved at vælge den rigtige størrelse og variant samt den korrekte anvendelse.
- Produktet bør ikke længere bruges, hvis det er beskadiget eller meget slidt, eller hvis eksisterende samlinger og låse ikke længere fungerer korrekt.
- Sørg for, at ingen stofdele beskadiges af eksisterende velcro-fastgørelseselementer.
- Anvend ikke produktet for stramt, da det kan skade blodcirkulationen.
- Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte din læge.
- Informér producenten og den kompetente myndighed i dit land om alvorlige hændelser med dette produkt.
- Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om produktet og dets håndtering, skal du kontakte din læge eller fagpersonale.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Samtidig brug med andre produkter kun efter konsultation med din læge.

Plejeinstruktioner:

Produktet kan rengøres manuelt ved hjælp af et mildt rengøringsmiddel. Plast- og metaldele på produktet (hvis de findes) må ikke vaskes og skal om muligt fjernes. Disse dele kan rengøres med en fugtig klud. Luk eksisterende velcro-fastgørelseselementer, før du vasker dem for at undgå at beskadige andet tøj. Lad produktet lufttørre. Undgå direkte varmekilder, og produktet må ikke tørres i en tørretumbler eller stryges stryg. Brug ikke kemiske rengøringsmidler, blegemiddel, opløsningsmidler eller blødgøringsmidler. Fedtstoffer eller sure midler, salver eller lotioner kan beskadige materialet.

Materialesammensætning:

PUR-skum, Polyamid (PA), Garn af bambuskul, Neopren (CR), PVC-læder, Jern, Aluminium, Polypropylen (PP)


Råd om opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted og beskyt det mod varme, direkte sollys og fugt.


Bortskaffelsesnotat:

Bortskaffelse i husholdningsaffald er muligt.


1

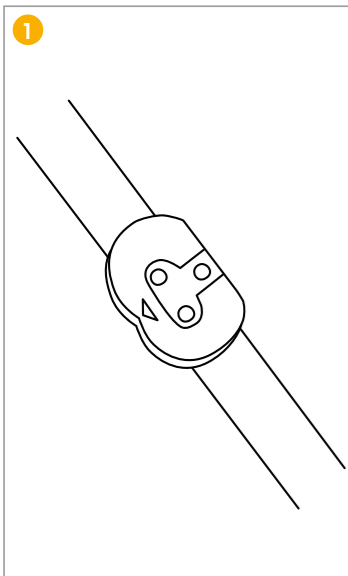


2

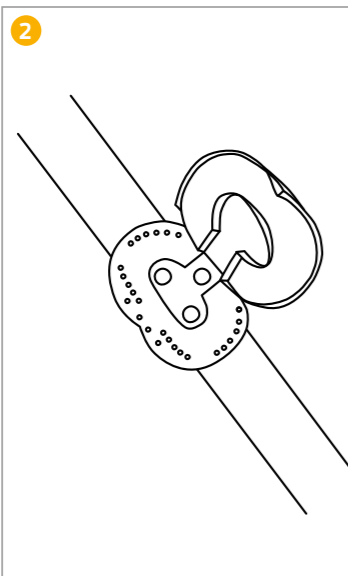


3

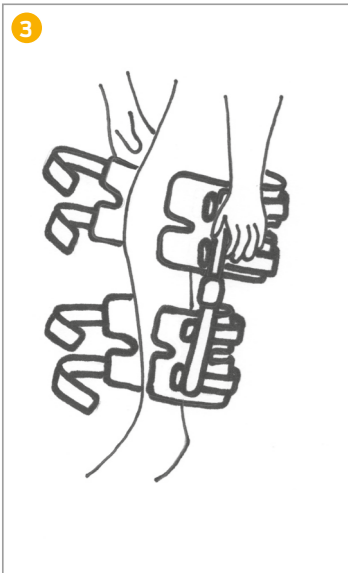


4

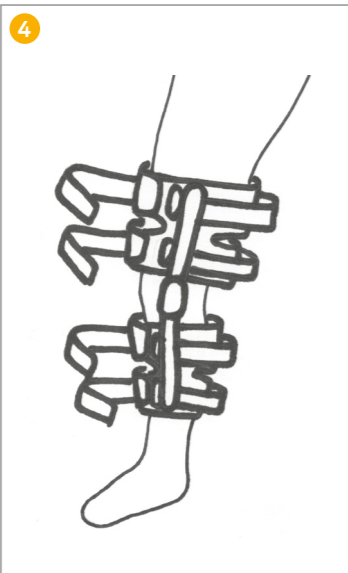

5

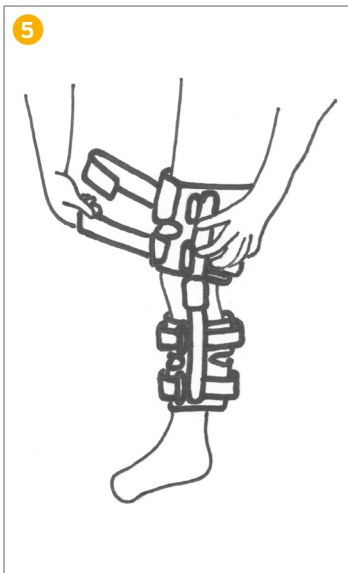

6

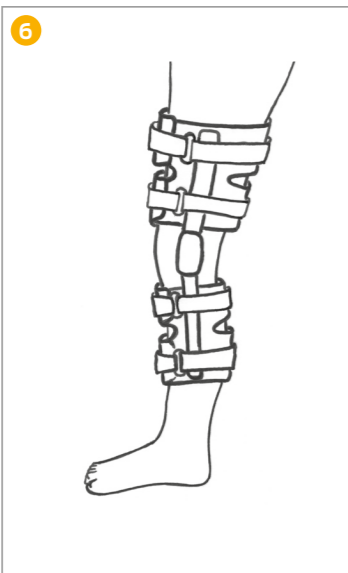

Schaper Healthcare GmbH
Vogelweiderstraße 146 | 4600 Wels | Austria
office@schaper-healthcare.com
www.schaper-healthcare.com



Version V03/2021/04

